

이관풍선카테터 | Navilloon-e



Specifications

구분	Model	Balloon diameter(mm)	Balloon length(mm)	풍선압력(atm)
네비게이션 비연동형	MG	30(확장 후)	20	12
		60(확장 후)		
네비게이션 연동형	MG	60(확장 후)	20	12

※ 사이즈의 경우 ±10%의 오차범위가 있을 수 있습니다

행위로 청구 가능

코 드	분류번호	급여구분	명 칭	
S5658	자566-1	급여	이관 풍선 확장술[내시경 또는 네비게이션 유도료 포함]	
상대가치 점수	단가(의원)	단가(병원)	단가(치과병.의원)	단가(보건기관)
1136.44	106,370	92,280	109,100	106,260


치료재료대 청구 가능

치료재료대 코드	품목명	규 격	급여구분
BJ4841MG	NAVILLOON-E	전규격	비급여


이관풍선확장술 3D 시뮬레이션




내시경 또는 네비게이션 의료용 입체정위기를 이용하여 비강으로 풍선카테터를 삽입합니다

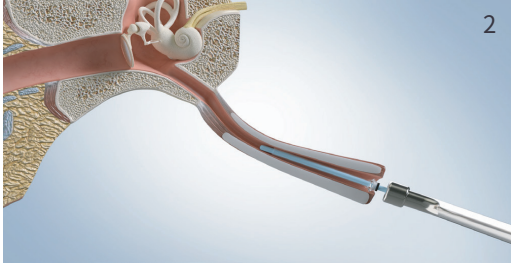

이관 입구부에 풍선카테터를 위치시킨 후, 풍선 컨트롤러를 전진시켜 풍선을 이관 내로 삽입합니다

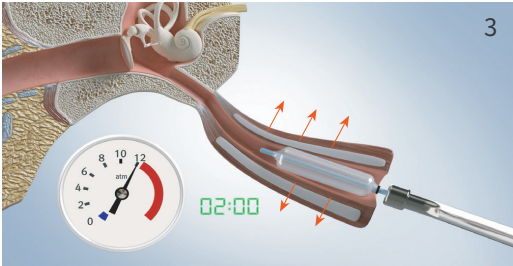

풍선확장기를 이용하여 풍선을 최대 12atm까지 팽창시킨 후 약 2분간 팽창 상태를 유지합니다

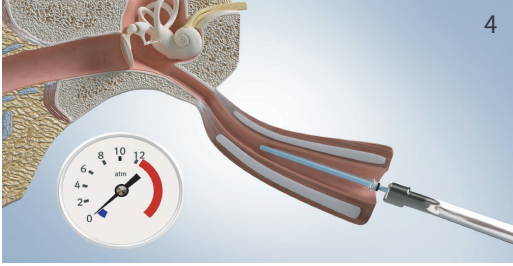

풍선을 완전히 수축시킨 후, 풍선 컨트롤러를 후진시켜 이관에서 풍선을 제거합니다



이관풍선확장술
원리 설명 동영상



이관풍선카테터
사용 방법 동영상